



DENTSPLY

JELTRATE

Jeltrate es un alginato para impresiones con fraguado normal Tipo II.

Posee agradable aroma a menta.

Cumple con la especificación N° 18 de la ADA.

INSTRUCCIONES DE USO:

Accesorios: Cuchara medidora para polvo y frasco medidor de agua, graduado en 3 niveles. Para cada medida de polvo (1 cuchara), use 1/3 de la medida de agua (1nível)

- Homogeneizar el Jeltrate, agitando su envase o contenedor, para despegar el polvo de las paredes del mismo.

- Medir las cantidades deseadas de Jeltrate golpeando suavemente la cuchara contra los lados del pote para asegurar una carga correcta.

-Eliminar el exceso de polvo con la espátula para que el polvo quede al ras en la cuchara

-Medir el agua empleando los medidores estándar agregando por cada cuchara de polvo 1/3 de medida de agua. Es conveniente que la temperatura del agua sea aproximadamente de 21°C ya que el agua más fría retarda el fraguado y más caliente lo acelera.

- Mezclar el polvo y el agua durante 1 minuto para obtener una consistencia cremosa.

-Es conveniente que el paciente se enjuague la boca previamente, con agua tibia.

- Colocar la cubeta con Jeltrate en la boca, hacer una suave presión para que se acomode en el lugar deseado y copie todas las áreas

- Hacer las correcciones musculares y mantener la cubeta inmóvil durante aproximadamente 1 minuto (pierde adhesividad al tacto).

- Retirar la cubeta con la impresión de la cavidad bucal, enjuagar con agua corriente y desinfectarla por aspersión de solución de glutaraldehído (Anti-G Plus). Para lograr mejores resultados, se recomienda vaciar el yeso inmediatamente después del término de la desinfección de la impresión. Sin embargo si es necesario hacer el vaciado más tarde, es posible guardar la impresión en el interior de un humidificador o envuelta en una toalla humedecida (Jamás guardar la impresión sumergida en agua).