

# TPH Spectrum

## Técnica clínica




Grabar esmalte durante 15 segundos y dentina durante 15 segundos o menos




Enjuagar 10 segundos




Secar sin resecar

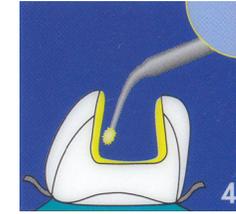


Aplicar adhesivo Prime & Bond 2.1 ó NT por 20 segundos

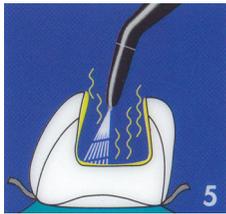


Eliminar el solvente con aire

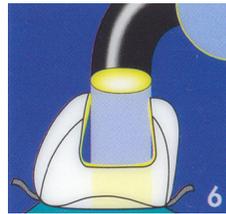


Fotopolimerizar por 10 segundos.

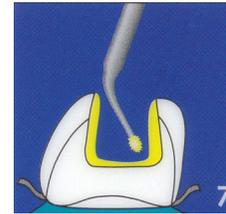


En caso de utilizar Prime & Bond 2.1 realizar una segunda aplicación

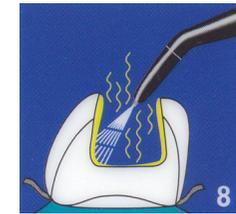


Eliminar el solvente con aire

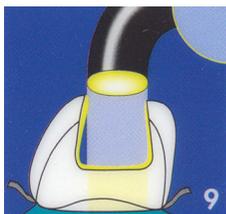


Fotopolimerizar por 10 segundos.

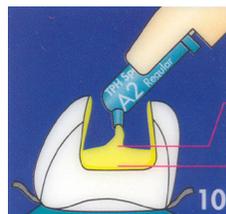

Aplicar TPH Spectrum en capas de 3mm

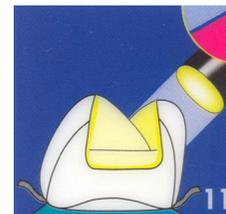

Fotopolimerizar cada capa durante 20 segundos

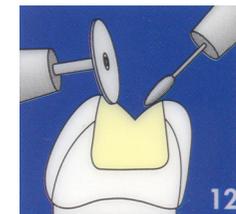

Pulir la restauración con Pasta Prisma gloss y Sistemas Enhance y PoGo.