

EGEO S.R.L.

MANUAL DE USO: ESTERILIZADOR POR CALOR SECO EG 18E

NOTA:

- Antes de desembalar el equipo, compruebe que la caja no esté dañada, o haya sufrido golpes durante el traslado.
- Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de operar la máquina.

Instalación:

Conecte el equipo a un toma corriente de 220V (no cambie el cable, ni la ficha y no utilice adaptadores que eliminen la conexión a tierra)-.

Características:

Su esterilizador cuenta con 1 programa fijo de 175°C-.

Modo de Trabajo:

El modo de trabajo del controlador es mediante un control electrónico-.

MUY IMPORTANTE:

No llene demasiado las bandejas, permita que el aire circule entre ellas para lograr una temperatura uniforme-. Se aconseja colocar el material limpio, seco y sin restos de residuos-. **Su equipo cuenta con tres bandejas de acero inoxidable y cuatro soportes en el horno para posicionarlas donde mas le convenga-**.

Funcionamiento:

- ♦ Encender el equipo mediante pulsar la tecla roja en posición "Si"-. Se iluminara la tecla, se escuchara una alarma sonora y se encenderá el equipo visualizándose en el display la leyenda "E18"-.
- ♦ Pulsar "Aceptar" para programar el tiempo de esterilización-.
- ♦ Mediante los pulsadores de "Subir" y "bajar" podrá seleccionar el tiempo de esterilización entre 20 y 120 minutos-. **Para instrumental odontológico se recomienda un tiempo de esterilización mínimo de 60 minutos-.**
- ♦ Por ultimo pulsar nuevamente "Aceptar" y el equipo comenzara a calentar-. En el display se visualizara una secuencia ascendente de luces, indicando que la resistencia esta calentando-.
- ♦ Una vez alcanza la temperatura, comenzara a descontar el tiempo, visualizándose esta información en el display del equipo-. Al alcanzar el tiempo seleccionado, se escuchara una alarma sonora indicando la finalización del ciclo y en el display se visualizara nuevamente la leyenda "E18"-.

Durante el tiempo de esterilización, intermitentemente se encenderá la resistencia cada vez que la temperatura este por debajo de los 175°C para mantenerla estable en forma automática-.

MANTENIMIENTO:

Para la limpieza interior o exterior del equipo **no utilice productos abrasivos, use alcohol o los denominados "limpiavidrios"**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación: 220 V / 50 Hz

Potencia: 300 W

Consumo: 1.4A

Medidas: Exteriores

Alto: 31 cm.

Ancho: 45 cm

Profundidad: 30 cm

Interiores

Alto: 22 cm.

Ancho: 32 cm

Profundidad: 25 cm

Warnes 1050 – (1834) Temperley – Buenos Aires- Argentina

Tel/Fax: (54-11) 4244-0471 / 4292-5304

Horario de atención de lunes a viernes de 7:00 a 12:00hs y de 12:30 a 16:00hs

E-mail: info@egeodental.com.ar / Web site: www.egeodental.com.ar