



**Uso:** cicatrizante por segunda intención; elemento oclusivo en pulpitis y otras patologías pulpares; compresa en alveolitis con o sin adenitis regional; compresa u oclusión en osteítis alveolar post-exodoncia.

**Contraindicaciones:** en caso de alergia o intolerancia comprobada a cualquiera de sus componentes. En todos los casos, el profesional actuante deberá valorar la conveniencia del empleo de la gasa iodoformada como elemento oclusivo, en reemplazo o acompañado de otras terapias concomitantes.

**Efectos secundarios:** aunque todos los elementos de fórmula han sido empleados con éxito durante décadas, es recomendable interrogar al paciente sobre ciertas predisposiciones hacia algunos de los componentes de gasa iodoformada.

**Efectos de reciprocidad:** se pueden producir efectos de reciprocidad con materiales aplicados a la sustancia dental (adhesivos o composites polimerizables). No compatible con materiales de obturación estética, ya que puede ocasionar manchas irreversibles sobre dichos materiales.

**Inserción:** previo a su empleo, irrigar la cavidad con solución fisiológica estéril. Aislar adecuadamente el campo. Con pinza y tijera aséptica, tomar y cortar el trozo de gasa necesaria y aplicar sobre la zona en cuestión, de modo oclusivo. Si la gasa toma contacto con la mucosa, retirar inmediatamente y enjuagar con abundante solución fisiológica estéril. A continuación, reiniciar la maniobra.

**Advertencias:** la gasa iodoformada puede provocar irritación si entra en contacto con los ojos. En caso de contacto, lávese inmediatamente con abundante agua y consulte a su oculista. **Para ser usado exclusivamente por el profesional médico** dentro de las pautas de buenas prácticas de dispensación, conforme la legislación de cada Estado parte. Cualquier uso fuera de los indicados en este instructivo, no está clínicamente probado y pueden representar un riesgo severo para la salud. No emplear este producto, fuera de las indicaciones del mismo. Ver la fecha de vencimiento. No utilizar una vez vencido el producto. **Mantener alejado de los niños.** En caso de ingestión accidental mantener al paciente hidratado y efectuar la consulta correspondiente al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología: Hospital de Pediatría Dr. R. Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 – Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/6458-7777.

**Almacenamiento y conservación:** mantener en su envase original, bien cerrado, al abrigo de la luz y la humedad. La temperatura ideal de conservación es entre 15 y 25 °C.

**Composición:** gasa hidrófila de textura reticulada, limpiada, previamente blanqueada, desengrasada y sin apresto, impregnada uniformemente de iodoformo, conteniendo 10% p/p de CHI<sub>3</sub>.



Fecha de vencimiento y número de lote: Ver envase del producto.  
Si tiene alguna consulta, por favor contáctese a [labpreston@ciudad.com.ar](mailto:labpreston@ciudad.com.ar)

Producto Médico Autorizado por la ANMAT N° 1313-205  
USO PROFESIONAL  
VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES e INSTITUCIONES SANITARIAS



LABORATORIOS  
**Dr. Preston** s.r.l.  
VILLARINO 2318 - (C1273ADH) - CABA  
ARGENTINA  
TEL./FAX: 4302-8582 - TEL. 4303-1474  
Email: [labpreston@ciudad.com.ar](mailto:labpreston@ciudad.com.ar)

Ult.Act. 07-10